

Actualización de evaluaciones clínicas

Adhesivo Single Bond Universal

Las evaluaciones clínicas que se destacan en este análisis documentan el desempeño del Adhesivo Single Bond Universal de 3M frente a las variables que los dentistas consideran más importantes cuando seleccionan un adhesivo dental.

Los resultados muestran que el Adhesivo Single Bond Universal es un producto realmente versátil, que puede ser usado a un alto nivel clínico, independientemente de la técnica, lo que permite a los dentistas simplificar el procedimiento de adhesión sin comprometer el resultado.



Desempeño comparado contra un producto favorito de confianza Restauraciones Clase V después de 24 meses y 114 restauraciones, % Clasificación Alfa

NC Lawson, A Robles, CC Fu, CP Lin, K Sawlani, JO Burgess, "Two-year clinical trial of a universal adhesive in total-etch and self-etch mode in non-carious cervical lesions", *Journal of Dentistry* 43 (2015) 1229-1234.

	% Clasificación Alpha: Cvar Modificado y Criterios Ryge		
	Single Bond Universal (grabado total)	Single Bond Universal (autograbado)	Adper™ Scotchbond™ Multipropósito (grabado total)
Retención	100	94.7	92.1
Decoloración marginal	86.8	72.2	71.4
Integridad marginal	68.4	47.2	65.7
Caries secundaria	97.4	94.4	97.1

Conclusión:

En los modos de grabado total o autograbado, el Adhesivo Single Bond Universal tiene un desempeño similar o superior al Adhesivo Scotchbond Multipropósito después de 24 meses.

Actualización de evaluaciones clínicas

Adhesivo Single Bond Universal

Desempeño a través de varios métodos de aplicación

Estudio NCCL de lesiones cervicales no cariadas, 172 restauraciones, 35 pacientes, 36 meses

AD Loguercio, EA de Paula, V Hass, I Luque-Martínez, A Reis, J Perdigao, "A new universal simplified adhesive: 36-month randomized double-blind clinical trial", *Journal of Dentistry* 43 (2015) 1083-1092.

% de Bien - Muy Bien: Criterios FDI				
	SBU GEh	SBU GEs	SBU GSe	SBU AG
Pigmentación marginal	93.2	93.2	90.9	82.5
Retención / Fracturas	97.8	97.8	97.8	88.9
Adaptación marginal	93.2	93.2	93.2	82.5
Sin sensibilidad posoperatoria	100	100	100	100
Sin caries secundarias	100	100	100	100

% de Clasificación Alfa: Criterios USPHS				
	SBU GEh	SBU GEs	SBU GSe	SBU AG
Pigmentación marginal	93.2	93.2	93.2	82.5
Retención / Fracturas	97.8	97.8	97.8	88.9
Adaptación marginal	84.1	88.6	86.4	75
Sin sensibilidad posoperatoria	100	100	100	100
Sin caries secundarias	100	100	100	100

- SBU = Adhesivo Single Bond Universal
- GEh = Grabado, Enjuague, Humedad Dejada
- GEs = Grabado, Enjuague, Secado
- GSe = Solo Grabado Selectivo de Esmalte
- AG = Autograbado

Conclusión:

Después de 36 meses, el éxito clínico confiable del Adhesivo Single Bond Universal cumplió con los criterios de la Asociación Dental Americana (ADA), para la aprobación total de todas las técnicas de grabado.

www.3MESPE.com



Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN
55144-1000 EUA
1-800-634-2249

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Alemania

Por favor, recicle.
Impreso en (PAÍS).

3M, Ciencia. Aplicada a la Vida., ESPE, Adper y Scotchbond son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH.

© 2015, 3M. Todos los derechos reservados.